


Algivon Plus / Algivon Plus Ribbon

Alginatförband impregnerat med medicinsk manukahonung

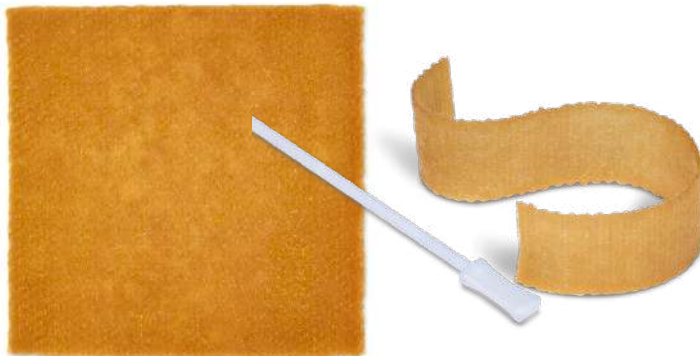

Produktinformation

Algivon Plus är ett mjukt alginatförband impregnerat med 100% Manukahonung. Alginatfibrerna möjliggör en förlängd effekt och långsammare utsöndring av honungen. Utmärkt för kaviteter samt debridering och upprepning av nekrotiska och orena sår. Skapar en fuktig sår läkningsmiljö, eliminerar odör samtidigt som förbandet ger en antibakteriell effekt.

Indikationer

Kan användas på alla typer av sår

- Trycksår
- Bensår
- Diabetessår
- Operationssår
- Nekrotiska sår
- Brännskador, typ 1 och 2
- Infekterade sår
- Transplantations- och donatorsår

Användarinstruktioner

- Se till att såret har rengjorts
- Torka försiktigt den omgivande huden
- Ta ur förband från förpackning
- Placera förband (uppåt eller nedåt) på sårytan
- Kan placeras sida vid sida vid större områden eller klippas till önskad storlek
- Täck med lämpligt sekundärförband
- Förvaras i rumstemperatur

Förbandsbyte

Beroende på sårexsudat kan Algivon Plus lämnas på plats i upp till 7 dagar. Algivon Plus kommer att vara mindre effektivt när honungen blir utspädd av sårexsudat, för att upprätthålla effektiv nivå bör du byta förband när färgen på förbandet ändras avsevärt.



Hållbarhet: 2 år i obruten förpackning

Material: Alginatfiber, 100% medicinsk manukahonung

Orderinformation

Art.nr	Benämning	Storlek	Avd. fp	Trp. fp	Klass
CR4230	Algivon Plus	5x5cm	5	280	MD IIb, steril
CR4225	Algivon Plus	10x10cm	5	280	MD IIb, steril
CR4441	Algivon Plus Ribbon (tamponad)	1,0x20cm	5	60	MD IIb, steril
CR4231	Algivon Plus Ribbon (tamponad)	2,5x20cm	5	60	MD IIb, steril