


# ACTIVON Barriärkräm med Manukahonung

## Produktinformation

- Activon Barriärkräm med 25% manukahonung är en effektiv barriär mot svett, urin, avföring, stomiläckage och sårvätska som varar i upp till 24 timmar
- Förebygger och behandlar öm och inflammerad hud samt främjar läkning
- Innehåller kakaosmör som återfuktar huden och hjälper till att förebygga fuktrelaterade hudskador (MASD)\*
- Andas, vilket minskar risken för hudmaceration
- Torkar inom 1 minut, kompatibel med sekundärförband och stomiprodukter
- Innehåller 99 % naturliga ingredienser. Fri från parfym, parabener och ftalater
- Tvättas lätt ur kläder och sängkläder. Fläckar inte bomull, nylon eller polypropen
- Avsedd för känslig, intakt samt lätt irriterad/skadad hud
- Krämen bildar en fuktbarriär (barriärfilm) upp till 24 timmar, beroende på slitage samt grad av läckage eller inkontinens. Applicera vid behov och enligt klinisk bedömning.
- Innehåller inga brandfarliga ämnen.



\*MASD (Moisture Associated Skin Damage)

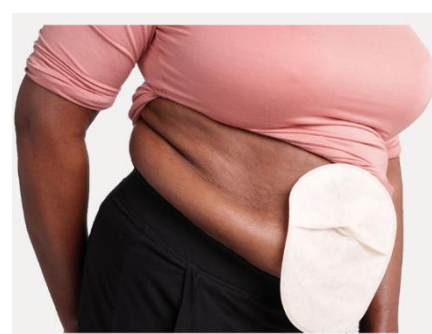

## Orderinformation

Art.nr	Benämning	Storlek	Avd. fp	Trp. fp	Klass
CR4546	Activon Barriärkräm med 25% manukahonung EAN: 5060031484724	100g	12st	12st	MD I

Förpackningsstorlek: W: 50mm D:42mm H:150mm, Tubens storlek: 125,7mm

# ACTIVON Barriärkräm med Manukahonung

## Hur ska man använda Activon Barriärkräm/Barriärfilm?

Används på områden med känslig, intakt och lätt irriterad/skadad hud där exponering för svett eller inkontinens (stomiläckage, urinläckage) är ett problem. Kan med fördel användas runt stomier.

Säkerställ att huden är ren och torr innan applicering. Använd sedan en ärtstor mängd kräm för att täcka ett område ungefär lika stort som din handflata.

Applicera INTE för mycket – lite räcker långt.

Krämen bör torka och lämna en genomskinlig film, vilket utgör fuktbarriären. Torktid ca: 1 minut

- **Använd INTE** på sprucken eller infekterad hud
- **Använd INTE** på öppna sår eller djupa sticksador
- **Använd INTE** om det finns kända allergier eller känslighet mot ingredienserna
- **Använd INTE** på spädbarn under ett års ålder

## Frågor och svar för Activon Barriärkräm

**F:** Kan Activon Barriärkräm användas på skadad eller infekterad hud?

**S:** Nej, Activon Barriärkräm är avsedd för intakt hud som är lätt irriterad, öm eller skadad. Använd INTE på skadad hud.

**F:** Finns det några åldersbegränsningar?

**S:** Ja, använd INTE på spädbarn under 1 år. Liksom med all honung finns det en risk för spädbarnsbotulism.

**F:** Hur ofta kan produkten appliceras? Kan den användas vid varje blöjbyte, även om det sker varje timme?

**S:** Applicera så ofta som behövs eller enligt rekommendation från vårdpersonal. Se till att området är rengjort och torrt före applicering.

**F:** Svider det när man applicerar krämen?

**S:** Nej, det ska inte svida. Vissa kan uppleva en lätt stickande känsla på grund av den medicinska manukahonungens verkan.

Observera att Activon Barriärkräm endast ska användas på intakt hud, INTE på skadad hud.

**F:** Lämnar krämen några rester?

**S:** Ja, när krämen torkat bildas ett genomskinligt fuktskyddande lager (barriärfilm).

Använd en ärtstor mängd och massera in krämen. När den torkat bildas ett klart skyddande lager på huden. Sekundärförband samt stomiprodukter fäster bra tillsammans med Activon Barriärkräm.

